

Sonde vaginale, couleur or

gymna

Art: 329978



Informations sur le produit

- Sonde de stimulation vaginale avec connecteurs 2 mm, couleur or.
- Pour électrostimulation et biofeedback.
- Avec un système de protection pour introduire et enlever la sonde sans abimer les cables.

Comment nettoyer les sondes ? Étant donné le caractère personnel et intime des sondes d'incontinence, il est recommandé que chaque patient s'achète sa propre sonde. Après chaque utilisation : nettoyer la sonde à l'eau savonneuse à l'aide d'une petite brosse afin de bien supprimer les mucosités. Bien rincer à l'eau claire et sécher complètement. Si nécessaire: pour la décontamination, utilisez **EXCLUSIVEMENT** une solution de trempage à froid bactéricide et virucide. Stocker ensuite dans son emballage.