


# Respirogram entraînement respiration

**gymna**

Art: 9011003 | Marque: [MEDINET](#)

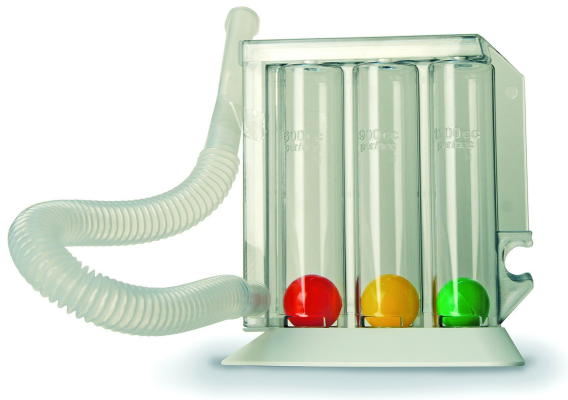

## Informations sur le produit

**POUR UN USAGE INDIVIDUEL** RESPIROGRAM est un entraîneur **respiratoire spécialement** conçu pour **favoriser une inspiration profonde** :

- respirer profondément permet d'une part de **dilater les alvéoles pulmonaires**.
- et d'autre part **d'éliminer les mucosités des voies respiratoires**.

### INDICATIONS DU RESPIROGRAM

- prévention des complications postopératoires comme une atélectasie, une pneumonie ou un dysfonctionnement pulmonaire.

### COMMENT UTILISER RESPIROGRAM ?

- après expiration, laissez votre patient inspirer profondément pour qu'il atteigne que deux ou trois balles 'montent'.
  - inspirer aussi longtemps que possible.
- retirer l'embout buccal et expirer lentement par le nez.
- relâcher après chaque inspiration profonde.
- répéter le processus (aussi souvent que vous l'indiquez).

### SPÉCIFICATIONS

- les graduations sur les cylindres **sont uniquement présentes à titre indicatif**.
- un filtre garantit qu'aucune particule dangereuse n'est inspirée.
- peut être entièrement démonté pour nettoyage.
  - nettoyer à l'eau chaude (40°).
  - ensuite laisser sécher.

### EMBALLAGE

- RESPIPROGRAM est livré avec un connecteur doté d'un filtre, ainsi qu'avec un tube doté d'un embout buccal.

**ATTENTION : RESPIPROGRAM n'est pas un dispositif destiné à mesurer le volume pulmonaire !**  
**RESPIPROGRAM convient uniquement pour un usage individuel.** Combinable avec l'entraîneur respiratoire RESPILIFT (art. 901.1004). De cette façon, il est possible d'inspirer et d'expirer consécutivement contre résistance.