


LEDSREACT Cone de direction 'smart physio cone'

gymna

Art: 510868 | Marque:

278,60 € ~~398,00€~~

Prix unitaire TVA incl.

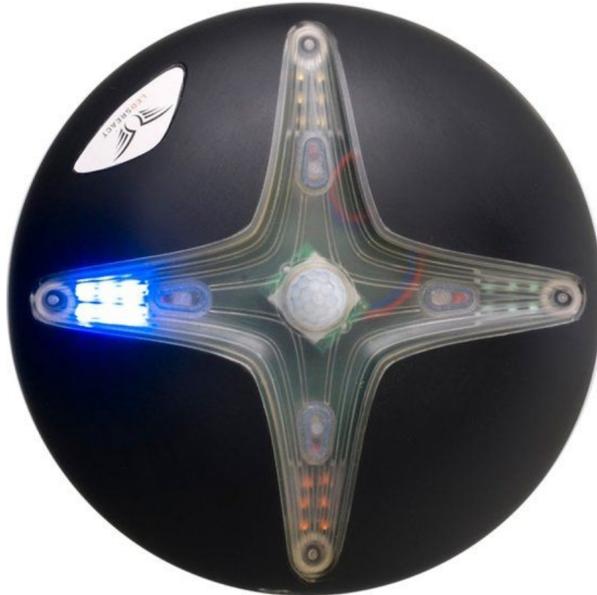

Informations sur le produit

Optez pour la revalidation FUN ! En manque d'inspiration pour le prochain exercice ? Ou à la recherche d'un nouveau type d'exercice ? Le LEDSREACT DIRECTION est un PHYSIO CONE 'MALIN' et 'agréable' permettant de faire passer vos traitements à un niveau supérieur.

- technologie intelligente.
- les quatre couleurs / lumières et directions sont réglables.
- vous associez chaque signal à une mission ou un mouvement déterminé.

MOTIVEZ VOTRE PATIENT ET METTEZ-LE AU DÉFI

- votre patient doit **réagir rapidement à la couleur et à la direction** indiquée par le LEDSREACT DIRECTION lorsqu'il se trouve tout près.
- des résultats thérapeutiques de haut niveau.
- un programme de revalidation plus varié et motivant.
- réagir de manière rapide et correcte aux signaux lumineux **stimule la motricité et la cognition.**

DES EXERCICES VARIÉS

- vous proposez des exercices avec les témoins lumineux (couleur et direction) du ledsreact DIRECTION uniquement,
- ou **vous combinez le cône et d'autres outils d'exercice** (Spots trainer, Slashpipe, Togu

ballstep, Mambo softmed balles poids, Bosu, cônes ...).

UN GAIN DE TEMPS

- votre patient sait parfaitement ce qu'il doit faire et peut travailler de manière autonome.

CHACUN Y TROUVE SON COMPTE

- vous adaptez le degré de difficulté des exercices à la progression de votre patient.

EXEMPLES D'EXERCICES

- en position assise avec les jambes allongées - toucher de la main la balle de la même couleur que le témoin lumineux.
- faire un sit-up - bouger la medicine ball dans la direction indiquée (gauche ou droite) et revenir au milieu.
- se pencher vers l'avant sur le Togu ballstep lorsque le témoin lumineux indique l'avant, idem pour les autres directions
- en position ventrale - toucher les marquages au sol/le spots trainer de la même couleur que le témoin allumé.
- faire un pas vers la droite lorsque le témoin droit s'allume et inversement.
- à partir d'une position à quatre points - adopter la position 'superman' avec le bras droit et la jambe gauche lorsque le témoin droit s'allume.
- ...

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?

- signaux lumineux dès que le capteur détecte une présence.
 - portée du capteur 3 mètres chez un enfant.
 - portée du capteur 4 mètres chez un adulte.
- intervalle de 2 à 3 secondes entre les signaux lumineux.
- chaque direction a sa propre couleur : bleu, vert, rouge ou jaune.
- les directions souhaitées peuvent être réglées en appuyant sur le bouton de la direction.
- la direction est active dès que le témoin rouge en bas est allumé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- charger la batterie pendant 3 h = 50 heures de plaisir et d'exercices.
- dès que les témoins commencent à clignoter, la batterie doit être rechargée.

Le pack contient : le LEDSREACT DIRECTION - chargeur de batterie avec câble USB - mode d'emploi.