

# Film Barrière - 3M Cavilon - 28 ml

Art: 575942 | Marque:

**gymna**

13,90 €

Prix unitaire TVA incl.



## Informations sur le produit

Le film barrière 3M Cavilon est un film concentré qui est vaporisé sur la peau pour la **protéger contre irritations**. Un deuxième effet du spray est que le **tape colle mieux sur la peau** et donne donc un effet prolongé.

### UTILISATION

- Nettoyez la peau et laissez-la bien sécher, le Cavilon n'adhère que sur une **peau sèche**.
- Quand vous utilisez le spray, tenir la tête du flacon à 10 à 15 cm de la peau et faire un mouvement fluide pour égaliser le film sur la surface sensible.
- Laissez sécher 30 secondes.
- Si nécessaire répétez l'application et laissez sécher 30 secondes.
- Dans les plis cutanés : écartez bien les plis et laissez bien sécher avant de relâcher la peau dans sa position initiale.
- Normalement ce n'est pas nécessaire d'enlever le film - si nécessaire, utilisez de l'huile douce.

Faites attention que le produit ne soit pas appliqué sur une blessure ouverte. En cas d'utilisation comme protection contre irritations : appliquez à nouveau après 48h ou après 3 lavages.