

Fasciq Tape Remover spray - 200 ml

gymna

Art: 575949



Informations sur le produit

Spray FASCIQ pour retirer les bandes de kinésiologie – un moyen rapide et doux pour la peau de retirer les bandes de kinésiologie

Retirer le ruban de kinésiologie, c'est simple, rapide et confortable avec **le spray décollant FASCIQ**. Ce spray a été conçu pour un usage professionnel et permet de décoller le ruban sans effort, sans agresser inutilement la peau.

Laisse agir le dissolvant quelques instants, puis retire le ruban facilement, sans laisser de résidus de colle. Grâce à sa formule douce, ce spray convient à différents types de peau et fonctionne aussi très bien sur la peau poilue.

Utilisation du spray décollant pour ruban adhésif

- Vaporise le spray FASCIQ Tape Remover directement sur le ruban adhésif appliqué.
- Laisse agir le spray pendant environ 1 minute.
- Retire le ruban adhésif délicatement et sans effort.

Caractéristiques

- Doux pour la peau
- Très doux et ne pique pas
- Fonctionne aussi bien sur la peau poilue
- Ne laisse pas de résidus de colle
- Sans produits chimiques agressifs
- Flacon pulvérisateur pratique sans aérosol

- Contenance : 200 ml