

# Freezpen cartouche N2O - 16 g (12 pcs)

***gymna***

Art: 511226 | Marque: FREEZPEN



## Informations sur le produit

Le gaz N2O est pulvérisé sur la peau sous haute pression, de sorte qu'il atteigne les structures plus profondes en quelques secondes. Vous pouvez travailler de manière très précise avec les différents applicateurs. La durée d'utilisation de la capsule dépend du diamètre de l'applicateur

- bleu : application 1 > 3 mm / avec une cartouche pleine, traiter pendant 230 > 270 sec.
- blanc : application 2 > 6 mm / avec une cartouche pleine, traiter pendant 145 > 180 sec.
- vert : application 4 > 8 mm / avec une cartouche pleine, traiter pendant 110 > 130 sec.