



Informations sur le produit

- Sonde de stimulation et pressofeedback vaginale avec connecteurs 2 mm, couleur blanc.
- 2 zones de stimulation en forme de bague pour un contact optimal.
- zone de pression en forme ballon.
- avec un embout élargie pour pouvoir introduire la sonde de façon optimale.
- pour électrostimulation et biofeedback.
- compatible avec les appareils Evostim P et Gymna Myo 200.
- art. 320.837 - adaptateur pour sondes - est nécessaire quand vous l'utilisez sur le Gymna Myo 200.

Comment nettoyer les sondes ? Étant donné le caractère personnel et intime des sondes d'incontinence, il est recommandé que chaque patient s'achète sa propre sonde. Après chaque utilisation : nettoyer la sonde à l'eau savonneuse à l'aide d'une petite brosse afin de bien supprimer les mucosités. Bien rincer à l'eau claire et sécher complètement. Si nécessaire: pour la décontamination, utilisez EXCLUSIVEMENT une solution de trempage à froid bactéricide et virucide. Stocker ensuite dans son emballage.