

# Winback Back3TX - TECAR thérapie - incl. chariot et **gymna**

## accessoires

Art: 580510 | Marque: WINBACK



## Informations sur le produit

Le Winback Back3<sup>TX</sup> est un appareil innovant pour la TECAR thérapie – livré avec des accessoires uniques et un chariot pratique.

TECAR signifie Transfert d'Énergie par des électrodes Capacitives et Résistives, mais la dernière génération des appareils Winback offre bien plus. Grâce à la tête de traitement TX intelligente avec différents accessoires, bracelets et pads fixes, il est possible de combiner jusqu'à 3 formes de courant (TECAR, Hi-TENS en Hi-EMS) simultanément, ce qui se traduit par un traitement plus rapide et plus efficace.

Le Winback Back3<sup>TX</sup> vous aide à soutenir vos techniques manuelles et vos mobilisations, mais peut également être utilisé pendant l'entraînement actif.

### PRINCIPES GÉNÉRAUX

- TECAR est un courant radiofréquence de 0,3 à 1,2 MHz qui traverse le corps via des électrodes capacitatives et résistives. Le courant TECAR assure une action biologique et diathermique profonde, favorise la circulation sanguine et lymphatique, et réduit la douleur et les inflammations.
- Hi-EMS développe un courant modulé de moyenne fréquence (1500-4000 Hz) qui stimule les muscles et les vaisseaux sanguins superficiels et profonds.
- Hi-TENS est un courant basse fréquence, modulé avec un signal haute fréquence qui agit sur les nocicepteurs. La neurostimulation entraîne un soulagement de la douleur immédiat et prolongé et aide à contrôler la phase inflammatoire.

### PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

- Traitez une partie du corps à l'aide de la poignée TX, des pads fixes ou des bracelets et d'une plaque de retour (fixe ou mobile).
- Choisissez le mode correspondant aux effets thérapeutiques souhaités :
  - CET: action locale sur les tissus mous
  - RET: tissu dur ou profond
  - MIX: tissu fibreux ou cicatrices
- Allez encore plus loin avec la multifréquence et gagnez en efficacité :
  - Combinaison Hi-TENS + RET : effet analgésique immédiat et prolongé et soulagement des points trigger
  - Hi-EMS + RET: mobilisation dynamique des muscles profonds
  - Hi-TENS + Hi-EMS + RET: bio-myo-neurostimulation : moins de douleur, moins de tension, plus de mouvement
- Power-In: le Back3<sup>TX</sup> ajuste automatiquement la puissance de l'appareil en fonction de l'impédance des tissus, de la distance entre les électrodes et de la taille des électrodes.
- TX<sup>TM</sup>: la poignée intelligente reconnaît différents types d'électrodes et de programmes et s'y adapte automatiquement. La couleur LED indique visuellement le mode choisi.
- Les bracelets RET remplacent les électrodes et donnent encore plus de liberté au thérapeute lors de son traitement. L'énergie Winback passe par les mains du thérapeute jusqu'au corps du patient.

## WINBACK ACADEMY

Apprenez à comprendre et à mieux utiliser votre appareil grâce à la Winback Academy. Chaque utilisateur d'un Winback Back3<sup>TX</sup> a accès à la plateforme d'e-learning, aux vidéos, aux protocoles et à la bibliothèque.

## Spécifications

- Livré standard avec:
  - 1 poignée TX
  - 11 électrodes (4 CET, 4 RET, 1 Hi-RET, 2 multipolaires)
  - 2 bracelets
  - 1 câble splitter 'Y'
  - 1 câble TECAR mobile RET
  - 1 câble TECAR mobile neutre
  - 1 câble adhésif RET
  - 1 câble adhésif neutre
  - 1 poignée de retour
  - 1 plaque de retour
  - 1 L de crème conductive
  - 1 paquet de 5 plaques de retour autocollants
  - 1 essui Winback
  - 1 chariot
  - manuel utilisateur et livre d'entraînement
- Puissance: 100 W
- Fréquences:
  - Tecar: 300 KHz, 500 KHz, 1000 KHz

- Hi-TENS: 2 Hz, 5 Hz, 25 Hz
- Hi-EMS: 1500 Hz, 4000 Hz
- Dimensions: Back3<sup>TX</sup>: 33,6 x 35,3 x 16,1 cm - Trolley: 103,2 x 56,9 x 35,4 cm
- Poids: Back3<sup>TX</sup>: 4 kg - Trolley: 17 kg