

Vervanging van een gasveer (hoofdsectie)


Vorbereiding

Geen speciale vereisten. Stel indien mogelijk de tafel in op een comfortabele hoogte voor gemakkelijke toegang.

Demontage

Geval 1: GymnaPro tafel verwijdering van één circlips

- Koppel het onderste gedeelte van de gasveer los van het frame. Gebruik een platte schroevendraaier of tang om de clip aan de zijkant van de gasveer te verwijderen.
- Verwijder de as. **HOUD het kussen vast** tijdens het verwijderen van de as, want niets houdt het kussen meer op zijn plaats zodra de as verwijderd is!

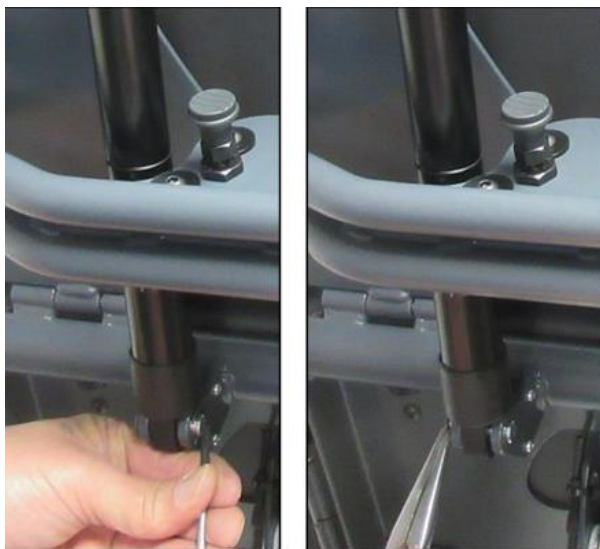

Geval 2: Advanced tafel beide circlips moeten worden verwijderd

- Gebruik een platte schroevendraaier om de twee circlips aan beide zijden van de gasveer te verwijderen.
- Verwijder de as. **HOUD het kussen vast** tijdens het verwijderen van de as, want niets houdt het kussen meer op zijn plaats zodra de as verwijderd is!



Demontage van de gasveer

Schroef de gasveer los door de zwarte cilinder van de gasveer linksom te draaien. Als de cilinder vastzit (Als hij niet loskomt), gebruik dan een tang om hem los te draaien




Montage

- Positioneer de nieuwe cilinder voor de schroefdraadaansluiting van de verchroomde as.



- Schroef de gasveer rechtsom (in de richting van de wijzers van de klok) totdat er een speling van 2~3mm is tussen de hendel en de stang van de gasveer.

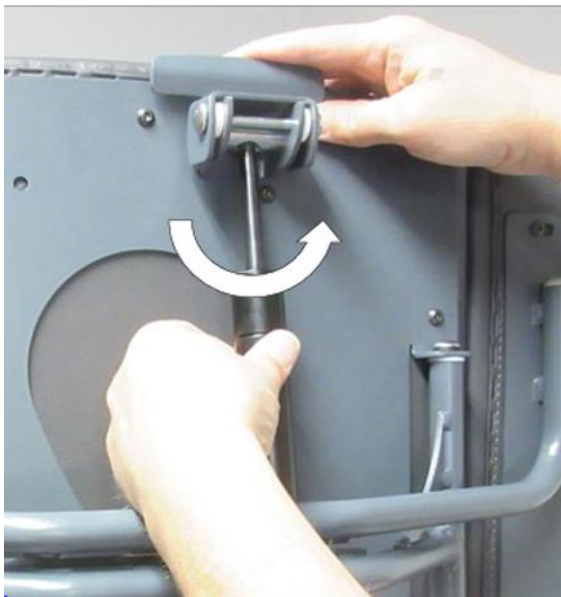

- Bedien de hendel om de gasveer te openen en plaats vervolgens de as en de circlips terug.