


A


lymphœdème I

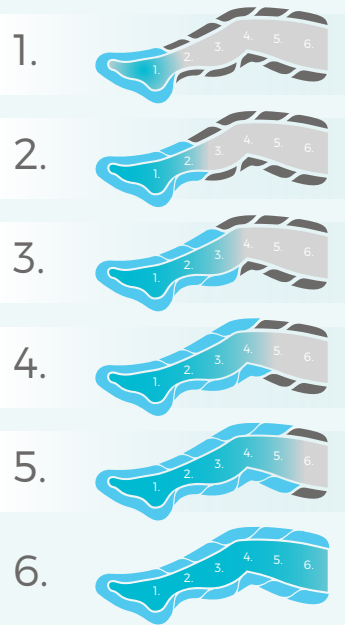

Durée	50 min.
Maintien	3 s
Intervalle	3 s

B

lymphœdème II

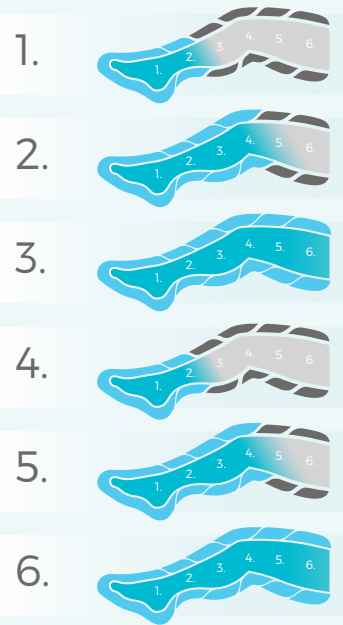

Durée	50 min.
Maintien	3 s
Intervalle	3 s

5.9. Programmes fournis

L'appareil dispose de six modes de fonctionnement / de massage prédéfinis.

A

Mode A – lymphœdème I

Déroulement du traitement :

Gonflage unique et successif des chambres consécutives tout en maintenant la pression dans les chambres précédemment gonflées.

- ▶ Durée : 50 min.
- ▶ Intervalle : 3 s
- ▶ Maintien : 3 s

B

Mode B – lymphœdème II


Déroulement du traitement :

Gonflage simultané de deux chambres consécutives tout en maintenant la pression dans les chambres précédemment gonflées.

- ▶ Durée : 50 min.
- ▶ Intervalle : 3 s
- ▶ Maintien : 3 s

C


lipœdème I

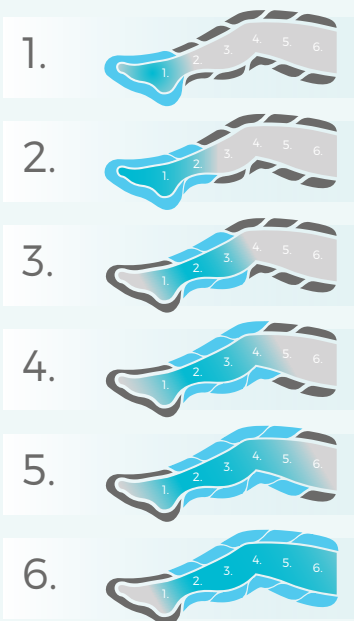

Durée	60 min.
Maintien	3 s
Intervalle	3 s

D

régénération

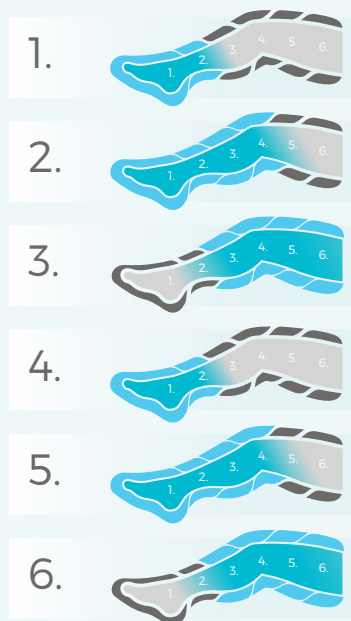

Durée	45 min.
Maintien	2 s
Intervalle	2 s

C

Mode C- lipœdème I

Déroulement du traitement :

Gonflage unique et successif des chambres consécutives tout en maintenant la pression dans les chambres précédemment gonflées, à l'exception de la première chambre gonflée, qui se dégonfle pendant le gonflage de la troisième.

- ▶ Durée : 60 min.
- ▶ Intervalle : 3 s
- ▶ Maintien : 3 s

D

Mode D - régénération

Déroulement du traitement :

Les chambres se gonflent par paires. Après le gonflage des première et deuxième chambres, les troisième et quatrième chambres se remplissent. Lors du gonflage des cinquième et sixième chambres, les première et deuxième chambres se dégonflent. Le cycle recommence lorsque les cinquième et sixième chambres sont entièrement gonflées.

- ▶ Durée : 45 min.
- ▶ Intervalle : 2 s
- ▶ Maintien : 2 s

E

prévention, relaxation

1.



2.



3.



4.



5.



6.



Durée	60 min.
Maintien	2 s
Intervalle	2 s

F

massage de toutes les chambres

1.



2.



3.



4.



5.



6.



Durée	30 min.
Maintien	2 s
Intervalle	3 s

E

Mode E – prévention, relaxation

Déroulement du traitement :

Les chambres se gonflent successivement. Après le gonflage de la deuxième chambre, la troisième commence à se gonfler tandis que la première se dégonfle simultanément. Lors du gonflage de la quatrième chambre, la deuxième se dégonfle. Le cycle se termine lorsque la sixième chambre est gonflée selon cette séquence.

- ▶ Durée : 60 min.
- ▶ Intervalle : 2 s
- ▶ Maintien : 2 s

F

Mode F – massage de toutes les chambres

Déroulement du traitement :

Toutes les chambres se gonflent simultanément et maintiennent la pression, réalisant un massage global.

- ▶ Durée : 60 min.
- ▶ Intervalle : 3 s
- ▶ Maintien : 2 s