


A


lymfoedeem I

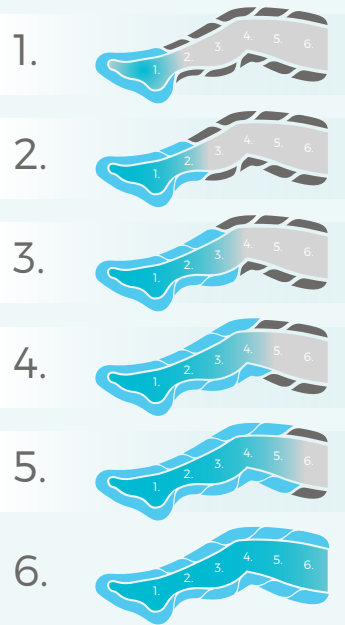

Tijd	50 min.
Vasthoudtijd	3 s
Interval	3 s

B

lymfoedeem II

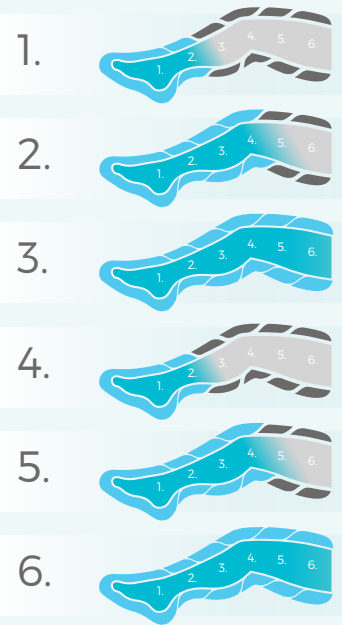

Tijd	50 min.
Vasthoudtijd	3 s
Interval	3 s

5.9. Meegeleverde programma's

Het apparaat beschikt over zes vooraf ingestelde werk-/massagemodi.

A

Mode A – lymfoedeem I

Verloop van de behandeling:

Eenmalige, opeenvolgende opblazing van de kamers, waarbij de druk in de eerder opgeblazen kamers behouden blijft.

- ▶ Tijd: 50 min.
- ▶ Interval: 3 s
- ▶ Vasthoudtijd: 3 s

B

Mode B – lymfoedeem II


Verloop van de behandeling:

Gelijktijdige opblazing van twee opeenvolgende kamers, waarbij de druk in de eerder opgeblazen kamers behouden blijft.

- ▶ Tijd: 50 min.
- ▶ Interval: 3 s
- ▶ Vasthoudtijd: 3 s

C


lipodeeem I

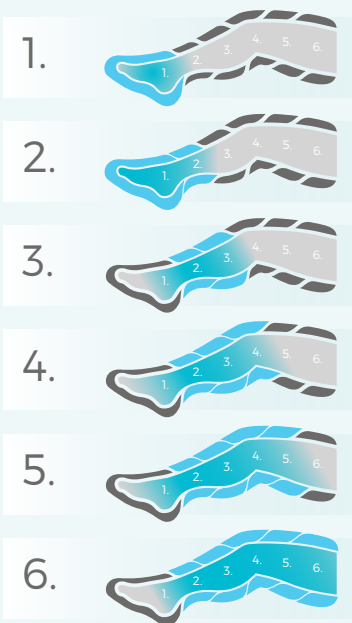

Tijd	60 min.
Vasthoudtijd	3 s
Interval	3 s

D

regeneratie

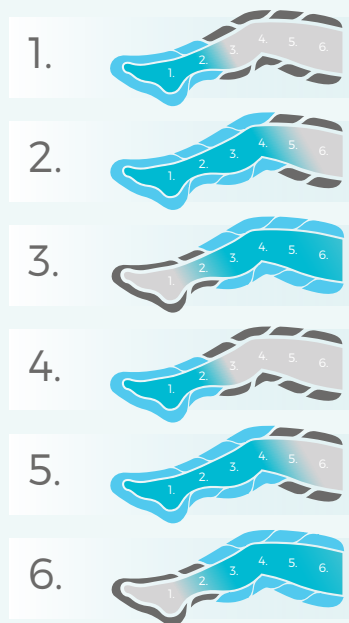

Tijd	45 min.
Vasthoudtijd	2 s
Interval	2 s

C

Mode C- lipodeeem I

Verloop van de behandeling:

Eenmalige, opeenvolgende opblazing van de kamers, waarbij de druk in de eerder opgeblazen kamers behouden blijft, met uitzondering van de eerst opgeblazen kamer, die leegloopt tijdens het opblazen van de derde kamer.

- ▶ Tijd: 60 min.
- ▶ Interval: 3 s
- ▶ Vasthoudtijd: 3 s

D

Mode D - regeneratie

Verloop van de behandeling:

De kamers worden per paar opgeblazen. Nadat de eerste en tweede kamer zijn opgeblazen, worden de derde en vierde kamer gevuld. Tijdens het opblazen van de vijfde en zesde kamer lopen de eerste en tweede kamer leeg. De cyclus begint opnieuw wanneer de vijfde en zesde kamer volledig zijn opgeblazen.

- ▶ Tijd: 45 min.
- ▶ Interval: 2 s
- ▶ Vasthoudtijd: 2 s

E

preventie, ontspanning

1.



2.



3.



4.



5.



6.



Tijd	60 min.
Vasthoudtijd	2 s
Interval	2 s

F

massage van alle kamers

1.



2.



3.



4.



5.



6.



Tijd	30 min.
Vasthoudtijd	2 s
Interval	3 s

E

Mode E – preventie, ontspanning

Verloop van de behandeling:

De kamers worden één na één opgeblazen. Nadat de tweede kamer is opgeblazen, begint de derde kamer op te blazen terwijl de eerste kamer gelijktijdig leegloopt. Tijdens het opblazen van de vierde kamer loopt de tweede kamer leeg. De cyclus eindigt wanneer de zesde kamer volgens deze volgorde is opgeblazen.

- ▶ Tijd: 60 min.
- ▶ Interval: 2 s
- ▶ Vasthoudtijd: 2 s

F

Mode F – massage van alle kamers

Verloop van de behandeling:

Alle kamers worden gelijktijdig opgeblazen en houden de druk vast, waardoor een globale massage wordt uitgevoerd.

- ▶ Tijd: 60 min.
- ▶ Interval: 3 s
- ▶ Vasthoudtijd: 2 s