

Instructions d'entretien

Système Game Ready* GRPro* 2.1 et manchons

Document complémentaire au manuel d'utilisation officiel

Ce document reprend des conseils pratiques d'entretien et d'utilisation pour le système Game Ready* GRPro* 2.1 et les manchons qui l'accompagnent. Il constitue un complément au manuel d'utilisation officiel et ne le remplace pas. Pour l'ensemble des consignes de sécurité, contre-indications, avertissements et spécifications techniques, veuillez toujours vous référer au manuel d'utilisation complet.

Tip: Utilisez de préférence de l'eau distillée, ou une eau peu calcaire, afin de limiter au maximum l'entartrage du système et de prolonger la durée de vie de l'appareil.

1. Remplir le réservoir d'eau

- Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au premier repère indicateur — ni plus, ni moins que ce qui est indiqué.
- Complétez ensuite avec de la glace, jusqu'au sommet du réservoir, sans dépasser la capacité maximale.
- Faut-il ajouter de la glace supplémentaire en cours de traitement ? Tenez alors toujours compte de la capacité maximale du réservoir. Videz au préalable un peu d'eau si nécessaire avant de compléter.
- Utilisez-vous l'appareil toute la journée ? Renouvelez alors entièrement l'eau au minimum toutes les 4 heures.

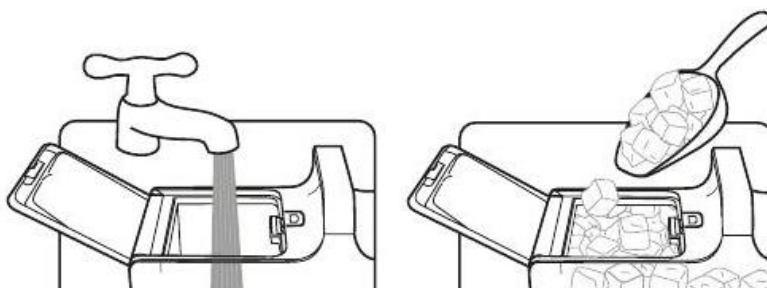


Illustration 1 — Remplissage du réservoir : d'abord de l'eau jusqu'au repère indicateur, puis complétement avec de la glace (source : manuel d'utilisation).

2. Préparer le manchon avant utilisation (« amorçage »)

- Raccordez le manchon à l'appareil et posez-le ouvert et à plat sur une table (pas sur le corps).
- Mettez l'appareil en marche et laissez le système fonctionner pendant 2 minutes sans compression (réglage de pression « Off »). Le manchon se remplit ainsi d'eau.
- Le manchon est alors prêt à l'emploi et le traitement peut commencer comme prescrit.

Tip: Cette étape permet d'éviter les messages d'erreur au démarrage du traitement et garantit un fonctionnement optimal du refroidissement et de la compression.

3. Après l'utilisation de l'appareil

- Ne débranchez le manchon qu'une fois qu'il est complètement dégonflé.
- Videz entièrement le réservoir d'eau.
- Séchez le réservoir à l'aide d'un chiffon.

- Laissez le clapet du réservoir ouvert après utilisation, afin que l'ensemble puisse continuer à sécher et que le joint d'étanchéité du réservoir soit préservé.

4. Entretien des manchons

4.1 Séchage

- Posez systématiquement les manchons entièrement ouverts pour les faire sécher après chaque utilisation.
- Ne pliez jamais les manchons immédiatement après utilisation et ne les rangez pas humides dans le sac de transport : cela entraîne quasi inévitablement l'apparition de moisissures avant la prochaine utilisation.
- Détachez si possible la housse du manchon et laissez les deux éléments sécher séparément.

4.2 Nettoyage

- La housse peut être nettoyée avec un savon neutre à l'aide d'un chiffon humide.
- En cas de salissure importante, la housse peut être lavée à la main. Ne lavez jamais la housse en machine.
- Le manchon lui-même (l'échangeur thermique) ne doit jamais être immergé dans l'eau. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon humide.
- La désinfection du manchon est possible. Consultez à cet effet les instructions de nettoyage et les produits autorisés dans le manuel d'utilisation complet.

5. Entretien de l'appareil

5.1 Le filtre

- Contrôlez régulièrement le filtre du réservoir d'eau et rincez-le, afin d'éviter toute accumulation de calcaire.

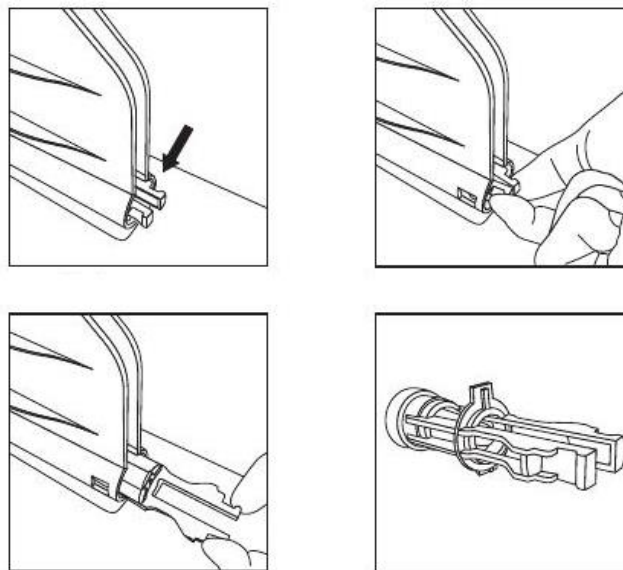


Illustration 2 — Retrait, nettoyage et remise en place du filtre (source : manuel d'utilisation).

5.2 Détartrage du système

- Remplissez le réservoir d'eau additionnée d'un produit détartrant (par ex. Calgon) ou de vinaigre ménager.
- Laissez l'appareil effectuer un cycle complet sans compression (réglage de pression « Off »).
- Videz ensuite le réservoir et faites tourner un cycle supplémentaire avec de l'eau claire uniquement, afin de rincer.

5.3 Fréquence recommandée

La fréquence à laquelle il convient de détartrer l'appareil et de nettoyer le filtre dépend de la fréquence d'utilisation de l'appareil. À titre de recommandation générale, il est conseillé d'effectuer cet entretien :

- Au minimum tous les 14 jours ; et
- Chaque fois que l'appareil ne sera pas utilisé pendant une période prolongée.

6. Pour plus d'informations

Pour l'ensemble des instructions relatives aux indications, contre-indications, avertissements de sécurité, codes d'erreur et spécifications techniques, veuillez toujours vous référer au manuel d'utilisation complet du système Game Ready* GRPro* 2.1.

Pour toute question ou tout problème concernant votre appareil, vous pouvez contacter notre service clientèle : info@gymna-barthels.be ou 089/510.550.