

Respirogram respiratie trainer

gymna

Art: 9011003 | Merk: [MEDINET](#)



Productinformatie

VOOR INDIVIDUEEL GEBRUIK RESPIPROGRAM is een **ademhalingstrainer** speciaal ontworpen om de **diepe inspiratie aan te moedigen**.

- Diep ademen helpt enerzijds om **de alveoli van de longen te doen uitzetten**.
- Anderzijds om **de mucus te verwijderen uit de luchtwegen**.

INDICATIES VOOR RESPIPROGRAM

- Preventie van postoperatieve complicaties zoals atelectase, pneumonie of pulmonaire dysfunctie.

HOE RESPIPROGRAM GEBRUIKEN?

- Laat uw patiënt - na expiratie - diep inademen zodat hij twee of drie balletjes omhoog krijgt.
 - Zo lang als mogelijk inademen.
- Mondstuk uitnemen en traag uitademen door de neus.
- Ontspannen na iedere diepe inspiratie.
- Proces herhalen (zo vaak u hem dat aangeeft).

PRODUCT SPECIFICATIES

- De maten op de cilinders dienen enkel als indicatie.
- Een filter verzekert dat er geen gevaarlijke stofdeeltjes ingeademd worden.
- Kan volledig uit elkaar gehaald worden om te reinigen.
 - reinigen met warm water (40°).
 - vervolgens laten drogen.

VERPAKKING

- RESPIPROGRAM wordt geleverd met een connector met filter, en een tube met mondstuk.

OPGELET RESPIPROGRAM is géén toestel om de luchtstroom te meten! RESPIPROGRAM is enkel geschikt voor individueel gebruik. Combineerbaar met de RESPILIFT expiratie-trainer (art. 9011004).

Op deze manier is aaneensluitend in- en uitademen tegen weerstand mogelijk.