

Vaginale sonde - Perisphera

gymna

Art: 577820



Productinformatie

- Vaginale stimulatiesonde met 2 mm aansluiting, wit.
- 2 sferische stimulatiezones voor optimaal contact.
- met verbredingsstuk aan het uiteinde om de sonde makkelijk op de juiste diepte in te brengen.
- Geschikt voor elektrostimulatie en feedback.

Hoe sondes reinigen? Gezien het persoonlijke en intieme karakter van incontinentiesondes is het aanbevolen dat iedere patiënt zijn eigen sonde aankoopt. Reinig de sonde na elk gebruik met zeepwater en verwijder de slijmen met een kleine borstel. Afspoelen met zuiver water en zorgvuldig afdrogen. Indien nodig: desinfecteer **UITSLUITEND** met een bacterie- en virusremmende koude oplossing. Stop de sonde terug in de verpakking.