


LEDSREACT Direction kegel 'Smart Physio Cone'

gymna

Art: 510868 | Merk:

€ 278,60 € 398,00

Stukprijs incl. BTW.

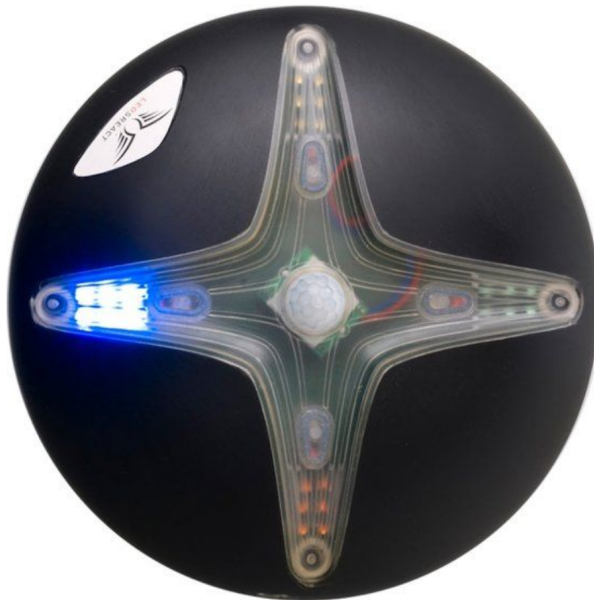

Productinformatie

Kies voor FUN-revalidatie! Even geen inspiratie meer voor uw volgende oefening? Of op zoek naar een nieuwe manier van oefenen? LEDSREACT DIRECTION 'SMART PHYSIO CONE' is een 'plezant' hulpmiddel om uw behandelingen naar een hoger niveau te brengen.

- Slimme technologie.
- De vier kleuren en richtingen zijn instelbaar
- U koppelt elk signaal aan een bepaalde opdracht of beweging.

CHALLENGE EN MOTIVEER UW PATIËNT

- Uw patiënt moet snel reageren op de kleur en de richting die de LEDSREACT DIRECTION 'SMART PHYSIO CONE' aangeeft als hij vlakbij is.
- Hoog niveau van behandelresultaten.
- Motivatie door meer afwisseling in het revalidatieprogramma.
- Snel en juist reageren op de lichtsignalen is bevorderend voor zowel motoriek als cognitie.

GEVARIEERD OEFENEN

- U geeft behandelingen met de lichtsignalen (kleur en richting) LEDSREACT DIRECTION 'SMART PHYSIO CONE' alleen.
- Of u combineert de kegel ander oefenmateriaal (Spots trainer, Slashpipe, Togu ballstep,

Mambo softmed gewichtsballen, kegels ...).

TIJDWINST

- Uw patiënt weet perfect wat hij moet doen en kan zelfstandig aan de slag.

VOOR IEDER WAT WILS

- U past de moeilijkheidsgraad van de oefeningen aan aan de progressie van uw patiënt.

VOORBEELDOEFENINGEN

- In langzit - de bal met dezelfde kleur als het lichtje met de hand aantikken.
- Een sit-up doen - de medicin bal in de aangegeven richting bewegen (links of rechts) en terugkomen naar het midden.
- Naar voor leunen op de Togu ballstep als het lichtje naar voor wijst. Idem voor de andere richtingen.
- In buiklig - de vloermarkering/spots trainer met dezelfde kleur als het lichtje dat brandt aantikken.
- Een uitvalspas doen met rechts als het rechter lichtje brand en omgekeerd.
- Vanuit vierpunthouding - een 'superman' beweging doen met de rechter arm en het linkerbeen als het rechter lichtje brandt.
- ...

HOE WERKT HET?

- Lichtsignalen van zodra sensor iemand detecteert.
 - Bereik sensor 3 meter bij een kind.
 - Bereik sensor 4 meter bij een volwassen persoon.
- Interval lichtsignalen van 2 à 3 seconden.
- Elke richting heeft haar eigen kleur: blauw, groen, rood of geel.
 - De gewenste richtingen zijn instelbaar door op de knop van de richting te duwen.
 - De richting is actief van zodra het rode lichtje eronder brandt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- De batterij gedurende 3 u opladen = 50 uur oefenplezier.
- Zodra de lichtjes beginnen te knipperen moet de batterij opgeladen worden.

HET LEDSREACT DIRECTION 'SMART PHYSIO CONE' PAKKET BEVAT

- LEDSREACT 'Smart Physio Cone' - batterijlader met USB kabel - handleiding.