

Hotpac cervicaal - 60 cm

gymna

Art: 114430



Productinformatie

Katoenen pakking voor lokale toepassing van VOCHTIGE WARMTE.

- Dankzij het speciale materiaal (o.a. vulkanische modder), behoudt de kompres gedurende minstens een half uur haar vochtige warmte.
- De kompres wordt opgewarmd door dompeling in water van max. 70° C .
- Vervaardigd in duurzaam materiaal, geschikt voor intensief gebruik.

Opgelet: leg altijd een hoes of een handdoek tussen de huid en de kompres. CONTRA-INDICATIES
WARMTETHERAPIE

- cardiovasculaire aandoeningen – doorbloedingsstoornissen - infecties met koorts - lokale ontstekingen en verwondingen - reuma met ontstekingsverschijnselen - onbehandelde tumoren – hyperthyreose - diabetes mellitus.