

3M Cavityl barrièrefilm - 28 ml

gymna

Art: 575942 | Merk: SOLVENTUM



Productinformatie

3M Cavityl Barrièrefilm is een geconcentreerde barrièrefilm die de intacte of **beschadigde huid tegen eventuele irritatie beschermt** en die de **kleefkracht van tape bevordert**.

WERKWIJZE

- reinig de huid en laat deze goed drogen, Cavityl hecht alleen op een **droge huid**
- bij gebruik van de sprayflacon, de spuitkop 10 tot 15cm van de huid houden en in een vegende beweging een gladde gelijkmatige filmlaag aanbrengen op het risicovolle oppervlak
- laat dit 30 seconden drogen
- breng een tweede laag aan indien de eerste niet dekkende is, laat opnieuw 30 seconden drogen
- bij huidplooien of ander huid-huid contact, scheid de huid goed van elkaar en laat de filmlaag goed drogen voor de huid in normale positie terugkeert
- verwijderen is meestal niet nodig, indien toch wenselijk, gebruik zoete olie

Zprijewoord de Cavityl spray in de wond zelf kan tippvloedvloed brengen. Bij gebruik als huidbescherming de spray elke 48 uur