



Productinformatie

VOOR INDIVIDUEEL GEBRUIK RESPIVOL is een medisch hulpmiddel om **diepe en langdurige** inspiratie te stimuleren.

- Geschikt voor patiënten die lijden aan restrictieve en/of obstructieve respiratoire aandoeningen.

INDICATIES VOOR RESPIVOL

- Preventie van postoperatieve complicaties.
- Patiënten waarbij respiratoire spiertraining voorgeschreven is omwille van malfunctie van de ademhalingspijpen door ziekte.
- preventie van verhoogde vatbaarheid voor respiratoire insufficiëntie zoals bij COPD.

HOE RESPIVOL GEBRUIKEN?

- U laat uw patiënt traag inademen tot de linkse floter zich tussen de markeringen bevindt.
 - Hij houdt dit zo lang mogelijk vol.
- Vervolgens begint de rechtse floter te stijgen.
 - Laat uw patiënt proberen om de rechtste markering - die u als therapeut heeft ingesteld - te bereiken.
 - De onderste markering dient om het werkelijk bereikte volume aan te duiden.
- Mondstuk uitnemen en traag uitademen door de neus.
- Ontspannen na iedere diepe inspiratie.
- Proces herhalen (zo vaak u hem dat aangeeft).
- Na de oefening hoesten om de slijmen te verwijderen.

WAAROM OEFENEN MET RESPIVOL?

- Feedback ingeademde luchtvolume.
- Laat evaluatie van progressie toe voor - en na operatie.

- Werkt sterk motiverend.

PRODUCT SPECIFICATIES

- 5.000 cc voor volwassene (2.500 cc voor kinderen – art. 9011002)
- Uitgerust met markeringen.
- Een filter verzekert dat er geen gevaarlijke stofdeeltjes ingeademd worden.
- Kan volledig uit elkaar gehaald worden om te reinigen.
 - reinigen met warm water (40°).
 - vervolgens laten drogen.

VERPAKKING

- RESPIVOL wordt geleverd met een connector met filter, en een tube met mondstuk.

OPGELET

- **RESPIVOL is géén toestel om het longvolume te meten!**
- **RESPIVOL is enkel geschikt voor individueel gebruik.**

Combineerbaar met de RESPILIFT expiratie-trainer (art. 9011004). Op deze manier is aaneensluitend in- en uitademen tegen weerstand mogelijk.