

Tristel Duo ULT desinfectie invasieve probes/sondes ***gymna***

- 250 ml

Art: 500906 | Merk: [TRISTEL](#)



Productinformatie

HYGIËNE IS EEN 'MUST' IN DE MEDISCHE WERELD! OOK IN ÚW PRAKTIJK. TRISTEL DUO ULT is een high-level desinfecterend schuim voor medische instrumenten op basis van chloordioxide. VOOR IEDERE INVASIEVE EN NIET-INVASIEVE PELVISCHES SONDE OF IEDERE ECHOPROBE

- Kinesithérapie: desinfectie van vaginale - en anale sondes en andere bekkenbodemtrainers gebruikt bij bekkenbodemtherapie.
- Gynaecologie: desinfectie van endovaginale echoprobes.
- Urologie: desinfectie van transrectale echoprobes.
- Radiologie: desinfectie van echoprobes en toebehoren (kabels, probehouders, toetsenbord,...).

TRISTEL DUO: EEN ONDERSCHIEDEND DESINFECTEREND PRODUCT

- Gevalideerd sporicide, virucide, fungicide, mycobactericide en bactericide resultaat in slechts 30 seconden.
- Reinigende werking en high-level desinfectie in één stap.
- Gebaseerd op de gepatenteerde en gevalideerde chloordioxide (ClO₂) werking van Tristel.
- Werkzaam tegen o.a. MRSA, Norovirus, Carbapenemase producerende enterobacteriën (CPE), Vancomycine resistente enterococci (VRE), HPV (Humaan Papilloma Virus), Clostridium difficile, ...
- Aanbrengen op de sonde/probe met een droog, niet-absorberend doekje, bij voorkeur Tristel Duo doekjes.
- Compatibel met echoprobes van toonaangevende fabrikanten zoals Siemens Acuson, BK Medical, Toshiba, General Electric (GE), Philips Medical Systems, SuperSonic Imagine ...

HOE TRISTEL DUO ULT GEBRUIKEN? 1. Doe handschoenen aan. 2. Druk op de doseerpomp om een dosis schuim te verkrijgen. Wrijf het schuim goed uit over het gehele oppervlak van het instrument. 3. Gebruik hiervoor het bijhorende TRISTEL DUO doekje (art. 500907). 4. Gooi daarna het doekje weg als

gewoon afval. 5. Laat het product zeker 30 seconden inwerken op het oppervlak van het instrument. Laat drogen. ZUINIG IN GEBRUIK

- Volume = 250 ml. Goed voor 156 desinfectieprocedures.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Elke bus TRISTEL DUO bevat 2 flacons. Eén flacon bevat citroenzuur (5%), de andere bevat natriumchloriet (0,5%).
- De vervaldatum op de verpakking geldt ook na opening van de bus.

Niet irriterend, niet toxisch en biologisch afbreekbaar. Medisch hulpmiddel klasse IIb (CE-markering) .