



Productinformatie

Anale druksonde met luchtslang, compatibel met Gymna Myo 200 en Evostim P.

- Voor meting van de kracht waarmee de anale spieren samen trekken.
- De patiënt is zich bewust van de wijze waarop de spieren werken dankzij de pressofeedback.
- Deze sonde kan niet gebruikt worden voor elektrostimulatie.
- art. 320.837 - adapter voor druksondes - is noodzakelijk bij gebruik op de Gymna Myo 200.

Hoe sondes reinigen? Gezien het persoonlijke en intieme karakter van incontinentiesondes is het aanbevolen dat iedere patiënt zijn eigen sonde aankoopt. Reinig de sonde na elk gebruik met zeepwater en verwijder de slijmen met een kleine borstel. Afspoelen met zuiver water en zorgvuldig afdrogen. Indien nodig: desinfecteer **UITSLUITEND** met een bacterie- en virusremmende koude oplossing. Stop de sonde terug in de verpakking.